



Andningsskydd FFP3 – bruksanvisning

Andningsskydd tillhör den personliga skyddsutrustningen och ska användas för att filtrera bort partiklar som inte ska inandas vid luftburen smitta som tex tuberkulos, mässling och vattkoppor.

Andningsskyddet (FFP3) finns i olika varianter – med ventil respektive med täckt ventil.

- FFP3 med täckt ventilen är även vätskeresistent och används då det finns risk för både luftburen- och droppsmitta t. ex vid operation av patient smittsam tuberkulos.
- FFP3 med ventil som inte är täckt har fullgod effekt mot luftburen smitta t. ex lungtuberkulos, mässling. FFP3 med ventil som inte är täckt kan kompletteras med stänkskydd som även täcker ventilen (visir rekommenderas), då uppnås samma effekt som FFP3 med täckt ventil.
- Alla typer av andningsskydd som används inom vården är av engångstyp.

Andningsskydd ska även användas då aerosolbildning förväntas, till exempel vid inhalationsbehandling, sugning av luftvägar och bronkoskopi av patient med exempelvis influenza.



Andningsskydd FFP3 med ventil.
Kombineras med Visir vid risk för
stänk (droppsmitta)



Instruktion:

- Det är mycket viktigt att andningsskyddet sluter tätt mot ansiktet. Personer med skägg har svårt att få andningsskydd att sluta tätt, vilket innebär risk för smitta.
- Användaren måste i förväg öva på/avtagning och utföra läckagetest.
- Andningsskyddet är engångs, personligt och kasseras efter varje användning.
- Andningsskyddet sätts på i slussen el dyl.
- Om andningsskyddet blir fuktigt eller nedsolkat ska det genast kasseras och nytt andningsskydd tas på.
- Skyddet har kapacitet att filtrera luft i högst åtta timmar.
- Desinfektera alltid händerna direkt efter användning av andningsskyddet.
- Andningsskydd behöver ofta kompletteras med skyddsglasögon eller visir.



Öppna förpackningen.
Näsbygeln är placerad i övre delen av masken. Forma bygeln genom att böja den försiktigt på mitten.



Lägg masken i den ena handen och vik ut den undre delen för att forma masken till en kupa. Vänd masken och ta med andra handen tag i banden.



SMITTSKYDD & VÅRDHYGIEN



Placera masken under hakan, över ansiktet samt dra banden över huvudet.



Placera det undre bandet runt nacken och det övre bandet uppe på huvudet. Justera maskens övre och undre del tills acceptabel komfort uppnås.



Forma näsbygeln efter näsan – använd båda händerna. Se till att andningskyddet sluter tätt runt näsa, kinder och haka.



SMITTSKYDD & VÅRDHYGIEN



Funktionskontroll:

- Ta god tid att sätta på dig andningsskyddet. Se till att det går ordentligt under hakan och att bygel över näsan sluter tätt
- Ta ett djupt andetag in, känn efter så att det sluter ordentligt tätt och att ingen luft sipprar in längs kanterna
- Andas ut och känn efter att ingen luft läcker ut längs kanterna
- Om luft läcker in eller ut kring kanterna, justera andningsskyddets näsbygel och/eller band

Det är mycket viktigt att andningsskyddet sluter tätt mot ansiktet eftersom luften ska filtreras i ventilen. Personer med skägg kan ha svårt att få andningsskyddet att sluta tätt vilket kan innebära risk för smitta.



Korrekt anpassat andningsskydd.
Andningsskyddet är engångs och kasseras efter användning. Händerna desinfekteras efter det att andningsskyddet tagits av.

Läckage test andningsskydd utan ventil:

Kupa båda händerna runt masken och **andas ut kraftigt**. Om du upptäcker läckage – korrigerar näsbygel, masken och banden.